

## DuraBase Soft

Material Reembasador Resiliente em sessão única no consultório.

- Auto polimerizável
- Permanece na boca sem desconforto do paciente
- Fácil manuseio
- Estabilidade de cor
- Econômico e fácil de usar

### INSTRUÇÕES

1. Limpe e asperize a área da prótese a ser reembasada. Seque-a completamente.
2. Lubrifique as superfícies labial e bucal até cerca de 3mm das margens periféricas.
3. Proporções recomendadas pó/líquido por volume:  
Pó 10mL – pote dosador 10mL  
Líquido 5mL - pote dosador 5mL.  
Adicione o pó ao líquido, misturando por 30 segundos.
4. Aguarde aproximadamente 1 minuto e aplique a mistura à prótese.
5. Coloque a prótese em posição e mantenha a boca do paciente fechada em oclusão.
6. Após 3 - 4 minutos na boca, faça o paciente mover os lábios e bochechas e então remova a prótese. Retire o excesso. Lave-a em água fria e recolocando-a na boca do paciente em seguida.
7. DuraBase Soft toma presa em aproximadamente 15 minutos na boca.
8. Remova a prótese e retire o excesso de material com uma lâmina ou tesoura. Utilize uma espátula aquecida para alisar as bordas.

Composição: Copolímero de etil metacrilato, monomero de etil metacrilato, dibutilftalato.

Conteúdo: 1 frasco de pó 25g, 1 frasco de líquido 20ml e 2 dosadores.

Resp. Técnica: Daniele C. Fonseca CRQ/SP 04236465

Reg. Anvisa nº: 10215440039

Fabricado por:

Reliance Dental Mfg. Co.

Worth, Illinois, U.S.A

Importado por:

Polidental Ind. e Com. Ltda.

CNPJ 48.875.447/0001-30

Tel: (11) 4613 6133 (Capital e Grande SP)