



PRESA RÁPIDA
Resina para Padrões

- Polimeriza em apenas 3 minutos
- Contração menor que outras resinas
- Fácil Manipulação
- Não distorce
- Queima sem deixar resíduo
- Granulação fina

Fabricado por:
Reliance Dental MFG. Company
Worth, IL 60482 U.S.A.

Importado e Distribuído por:
Polidental Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 48.875.447/0001-30
São Paulo SP Brasil



Técnica do Pincel

- Despeje uma pequena porção de Duralay II pó em um pote dappen e cerca de 6 gotas de Duralay II líquido em outro pote dappen.
- Mergulhe a ponta do pincel no líquido e depois no centro do pó para formar uma bolinha na ponta do pincel.
- Deposite a mistura no preparo e faça a escultura repetindo o processo.

Indicações de Uso

- Coroas cônicas e telescópicas
- Incrustações, barras linguais e palatais, conectores e grampos
- Prótese adesiva
- Material auxiliar para escultura de padrões em trabalhos de coroas e pontes.
- Junção de peças para soldagem

COMPOSIÇÃO:

Copolímero de metil metacrilato,
monômero de metil metacrilato,
parafina e óleo mineral

CONTEÚDO:

1 frasco com 28g de pó
1 frasco com 30ml
1 isolante
1 conta gotas

Tec. Resp.:

Daniele C. Fonseca
CRQ/SP 04236465