

# Endométhasone N & Canal Plus

## Combinação Perfeita para um Excelente Tratamento!

O Produto nº 1 da Septodont, o mais vendido no mundo, de volta ao Brasil!



- Cimento Endodôntico a base de Óxido de Zinco  
- Hidrocortisona – Anti-inflamatório  
- Timol Iodado – Antisséptico

### INDICAÇÕES

- Obturações definitivas de canais.
- Pode ser utilizado com cones de gutta-percha.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

### APRESENTAÇÃO

Frasco com 14g de pó.

### FÓRMULA

- Óxido de Zinco, Acetato de hidrocortisona, Timol iodado, Sulfato de Bário, Estearato de Magnésio

### PROPRIEDADES

Cimento de obturação endodôntica com perfeita tolerância pelos tecidos, não reabsorvível e de fácil introdução nos canais. Sua radiopacidade prolongada permite a preservação do tratamento durante anos.

Devido a sua ação anti-inflamatória e antisséptica previne dor pós-operatória e periodontites de origem medicamentosa.

Em pequenos extravasamentos periapicais o organismo consegue reabsorve-lo antes de sua presa final.

Seu tempo de presa é de aproximadamente 12 horas.

Fácil remoção se necessário, através de um solvente(Endosolv).

### MODO DE APLICAÇÃO

Após o preparo cuidadoso do canal e sua antissepsia através de irrigação com solução antisséptica, enxaguar e secar, preparando o mesmo para a obturação.

No preparo da pasta deve ser adicionado 7 partes de pó para 1 parte de eugenol até obter uma pasta de consistência de vaselina.

Para obter resultados excelentes, aconselha-se a misturar durante 40 segundos.

Em seguida obture o canal com a técnica de sua preferência.



*Excelente viscosidade, cor marfim e agora sem paraformaldeído!*

Descubra o poder do EDTA Gel + Peróxido de Hidrogênio, Sem Igual



A base EDTA Gel  
- Lubrificante com ação quelante

Peróxido de Hidrogênio  
- Previne escurecimento pós-tratamento endodôntico

### INDICAÇÕES

- Permite um alargamento mais eficaz.
- Tratamento de canais calcificados ou atrésicos.
- Lubrifica e facilita o trânsito de instrumentos manuais e rotatórios.
- Previne e auxilia na remoção dos instrumentos fraturados.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

### APRESENTAÇÃO

Seringa com 5g e 5 ponteiros aplicadoras.

### FÓRMULA

EDTA, Peróxido de Hidrogênio, PEG.

### PROPRIEDADES

Canal Plus é um EDTA Gel que lubrifica e facilita a instrumentação do canal, prevenindo e evitando a fratura ou auxiliando na remoção

de instrumentos fraturados. A sua ação quelante age sobre os cristais de hidroxiapatita promovendo um amolecimento da dentina. Indicado principalmente para tratamentos de canais calcificados e atrésicos. A reação do peróxido de hidrogênio com o hipoclorito de sódio provoca uma ação efervescente que desloca e remove o tecido pulpar, lama dentinária, bactérias e resíduos sanguíneos e purulentos, evitando um possível escurecimento tardio do dente.

### ATENÇÃO

- Evitar usar o Canal Plus até o último número. Mesmo que o produto seja altamente solúvel, deve-se assegurar que nenhum traço do produto permaneça no canal.
- Canal Plus não deve ser deixado no dente entre duas consultas.

### MODO DE APLICAÇÃO:



Aplique o Canal Plus diretamente no canal através da ponta aplicadora. Aguarde de 1 a 2 minutos a ação do EDTA.



Sua consistência em gel permite a aplicação através das limas e as lubrifica durante a instrumentação.




Faça a instrumentação do canal com a técnica de sua preferência. Pode ser empregado tanto na Técnica Clássica como na Técnica Progressiva.



Irrigue o canal com Hipoclorito de sódio que auxiliará na remoção do smear layer, resíduos pulpares, sanguíneos e purulentos. Espire o líquido remanescente. Repita o processo até chegar no alargamento desejado



Canal Plus pode ser utilizado com instrumental de sua preferência, manual ou rotatório, de aço inoxidável ou níquel titânio.

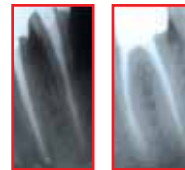

Ao final da instrumentação irrigue, seque e obture o canal. Canal Plus torna os procedimentos endodônticos mais fáceis e rápidos e garante melhores resultados.



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucurui, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
http://www.septodont.com.br