

DUOLAY PHOTO

Utilizando Resina Duolay Photo e Líquido Fotopolimerizável

Após a elaboração e confecção dos troquéis no modelo:

01. Preparar bancada de trabalho com os respectivos materiais.



02. Hidratar modelo por 10 minutos e isolar com isolante que acompanha o kit Duolay Photo. Preparar 1 pote de dappen com resina Duolay Photo e 01 pote dappen com líquido Duolay Photo fotopolimerizável.



03. Aplicar resina vermelha nos preparos dos dentes pilares e fotopolimerizar por 2 minutos



04. Fotopolimerizando por 2 minutos.



05. Retirar e verificar a adaptação dos casquetes no preparo.



06. Posicionando o pontico para união com os retentores. Confeccionar o pontico de acordo com o dente a ser esculpido:

- Dentes anteriores – plano inclinado
- Dentes posteriores – formato de pêra



07. Fixar com Resina Duolay Photo o pontico aos dentes retentores.



08. Fotopolimerizar por 2 minutos.



09. Aspecto final do trabalho acabado e polimerizado.

Observação:
A partir daí:
Encerar, aplicar retenções, abertura de caixa e fundição.
Verificar o tipo de trabalho a ser executado,
dependendo do trabalho, aplica-se retenções ou não.



Com a Resina Duolay Photo, podemos confeccionar barras de protocolo de implantes para posterior fundição.

*REGISTRO ANVISA Nº 10216040024