

Composição:

Dióxido de Silício.
Ceras Artificiais.

Indicações:

Bastão para brilho em prótese dentária.

Precauções:

Utilizar equipamento de proteção individual.

Conteúdo:

Bastão de 150g.

Aplicação:

- Dar acabamento com Pedra Pomes, escova nº 10 e escova de pano;
- Usar VIPIBRIL da seguinte maneira: passar o bastão para brilho na escova de flanela até obter a aderência do produto; passar a prótese na escova de flanela, como de costume, até obter o resultado final.

Diferencial Competitivo

- Melhor resultado e agilidade no trabalho.
- Fórmula balanceada que não agride a escova de polimento.
- Produto único no mercado.

**PERGUNTAS MAIS FREQUENTES****Posso utilizar o VIPIBRIL com escova de flanela úmida?**

Não! O VIPIBRIL foi elaborado para ser utilizado com escova de flanela seca, evitando sujeiras e a impregnação do produto nas ameias.

O VIPIBRIL desgasta a escova de polimento?

Não! Devido a sua composição inovadora, o VIPIBRIL não agride a escova de polimento, de modo que o abrasivo permanece na escova para intensificar o brilho da prótese dentária.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Hélio Wiebeck CRQ-IV 04302790

Produto isento de registro na ANVISA conforme resolução RDC nº 260 de 23/09/2002