

**1) DEFINIÇÃO**

Moldeiras parciais descartáveis para impressão dupla e registro de mordida

**2) INDICAÇÕES**

Moldagem simultânea das arcadas superior e inferior, e registro de mordida

**3) COMPOSIÇÃO**

- Suporte: 100% polietileno    Rede: 100% polipropileno

**4) VANTAGENS E DIFERENCIAIS DO PRODUTO**

- Moldeira dupla – molda arco superior e inferior e, ao mesmo tempo, registra a mordida, proporcionando maior economia de tempo e material
- Descartável – evita riscos de infecção cruzada
- Maior conforto ao paciente – por ser parcial, causa menor desconforto em pacientes que tem sensibilidade na região posterior ( ânsia)
- Edentação das bordas – permite retenção mecânica do material de moldagem
- Tela de apoio do material fina, não interfere no registro de mordida

**5) TÉCNICA DE USO**

- Prova da moldeira na boca do paciente
- Preenchimento da moldeira, em ambos os lados, com material de impressão pesado, e da área a ser moldada com material de impressão leve;
- Introdução da moldeira na boca, pedindo a paciente que oclua;
- Aguardar a presa do material de moldagem e remover da boca do paciente.

**6) APRESENTAÇÕES DO PRODUTO**

Referência	Nome	Apresentação
250	Moldex sortida	12 moldeiras (04 ant, 04 post G, 04 post P)
251	Moldex anterior	12 moldeiras anteriores (tamanho único)
252	Moldex posterior	12 moldeiras posteriores ( 06 G, 06 P)

Registro Anvisa: 10349450043

Prazo de Validade: 5 anos