

1) DEFINIÇÃO

Comercial: resina opacificadora fotopolimerizável

2) INDICAÇÃO

Mascaramento de dentes escurecidos e manchados, superfícies metálicas e pinos de carbono.

3) COMPOSIÇÃO

- Monômeros: Bis GMA, dimetacrilato de uretano; catalisadores; pigmentos e estabilizadores

4) VANTAGENS E DOFERENCIAIS DO PRODUTO

- Alta opacidade
- Fotopolimerizável
- Excelente viscosidade possibilitando o uso com pincéis
- Opções de cores: adaptação para todos os casos clínicos

5) TÉCNICA DE USO

- Aplicação de ácido fosfórico 37% (se a resina for aplicada em dentina) ou ácido fluorídrico 10% (se aplicada em cerâmicas);
- Aplicação de adesivo seguida de fotopolimerização;
- Aplicação da resina OPAK seguida de fotopolimerização;
- Recobrimento com a resina da cor selecionada.

6) APRESENTAÇÕES DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
493	Opak B 0,5	1 ser. com 1,5g de Opak B,05
494	Opak A3	1 ser. com 1,5g de Opak A3

Registro Anvisa: 10349450029

Prazo de Validade: 2 anos