

1) DEFINIÇÃO

Coroas provisórias universais

2) INDICAÇÃO

Confecção de coroas provisórias em incisivos centrais e laterais

3) COMPOSIÇÃO

Polycarbonato

4) VANTAGENS E DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Utilização para ambos os lados realizando pequenos ajustes
- Facilidade de ajustes
- Adesão química à resina de reembasamento
- Excelente forma anatômica
- Versatilidade de tamanhos facilitando a adaptação para a maior parte dos casos clínicos
- Cor universal

5) TÉCNICA DE USO

- Selecionar o melhor tamanho de Provjet;
- Realizar os ajustes para transformação da coroa para o lado esquerdo ou direito, e realizar o reembasamento com resina acrílica da cor selecionada.

6) APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Referência	Nome	Apresentação
300	Provjet	12 unidades (6 inc centrais: 2P, 2M e 2G; 6 inc. laterais: 2P, 2M e 2G).

Registro Anvisa: 10349450040

Prazo de Validade: 10 anos