



## VIPI MOLD

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL  
PARA MOLDEIRA E BASE DE PROVA



A: 05/08

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.  
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial  
CEP 13.633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil  
Fone: +55 (19) 3565-5656 - Fax: +55 (19) 3565-5650  
SAC: 0800-0157700 - sac@vipi.com.br - www.vipi.com.br  
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73 - Inscr. Est. 536.012.208.119  
Químico Responsável: Helio Wiebeck - CRQ-IV 04502790  
Registro ANVISA Nº 1021604009 - Indústria Brasileira  
Peso e composição: Vide Cartucho - Validade 10 anos

### RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA MOLDEIRA E BASE DE PROVA

#### Modo de usar:

- Colocar 15g de pó para 7,5ml de líquido VIPI FLASH;
- Misturar e aguardar a fase plástica;
- Moldar no formato desejado e aplicar no modelo, ajustando com os dedos;
- Retirar o excesso;
- Após a reação (exotérmica) aguardar cerca de 3 minutos para retirar o modelo.

#### Composição:

- Polimetilmetacrilato
- Talco
- Peróxido de Benzoíla
- Estearato
- Pigmentos Biocompatíveis

Precauções: Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação e manutenção da prótese, bem como para proteção individual; Somente para uso odontológico; Pode formar misturas ar/pó inflamáveis; Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção; O manuseio desta resina não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto; Conservar ao abrigo da luz e calor; Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.