

# Acry Plus

Dentes acrílicos conforme ISO 22112:2005, Tipo 1 (anteriores) e Tipo 2 (posteriores).

**Indicação:** Os dentes acrílicos Acry Plus são indicados para uso em prótese dentária total ou parcial.

## Aplicações:

- Prótese parcial ou total.
- Overdentures.
- Coroas ou pontes temporárias.
- Prótese fixa ou removível.



## Modelos:

Anteriores Superiores:

P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, P 7, P 8, P 9, T 1, T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, V 1, V 2, V 3, V 4, V 5.

Anteriores Inferiores:

X 1, X 2, X 3, X 4, X 5, X 6, X 7, X 8, X 9, X 10.

Posteriores Superiores e Inferiores:

Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6.

## Cores:

A 2, A 3, 1 A, 2 A, 1 D, 2 B.

## Especificação conforme ISO 22112:2005 Dentes artificiais de plástico:

Material: Conforme

Tamanho e Forma: Conforme

Cor e Combinação: Conforme

Ausência de Irritantes: Certificado Citotoxicidade

Ausência de Imperfeições: Conforme

Acabamento Superficial: Conforme

Adesividade: Conforme

Propriedades Mecânicas: Conforme

Estabilidade da Cor à Luz: Conforme

Resistência ao Manchamento, Deformação e Quebra: Conforme

Estabilidade Dimensional: Conforme

## Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

**Contra-indicações:**

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

**Armazenagem:**

Conservar ao abrigo de luz e calor.

**Tabela de Articulações:**

	ANTERIOR	POSTERIOR
P 1	<u>X1-X3</u>	<u>Z3</u>
P 2	<u>X2-X5</u>	<u>Z3</u>
P 3	<u>X3-X5</u>	<u>Z3-Z5</u>
P 4	<u>X5-X6</u>	<u>Z5</u>
P 5	<u>X7-X8</u>	<u>Z4</u>
P 7	<u>X8-X9</u>	<u>Z6</u>
P 8	<u>X5</u>	<u>Z5</u>
P 9	<u>X7</u>	<u>Z4-Z5</u>
T 1	<u>X3</u>	<u>Z3</u>
T 2	<u>X3</u>	<u>Z3-Z5</u>
T 3	<u>X2</u>	<u>Z2</u>
T 4	<u>X4</u>	<u>Z2</u>
T 5	<u>X10</u>	<u>Z4</u>
T 6	<u>X7</u>	<u>Z4</u>
T 7	<u>X8</u>	<u>Z4</u>
T 8	<u>X5</u>	<u>Z3-Z5</u>
T 9	<u>X3</u>	<u>Z3-Z5</u>
V 1	<u>X3</u>	<u>Z3-Z5</u>
V 2	<u>X5</u>	<u>Z5</u>
V 3	<u>X7</u>	<u>Z5</u>
V 4	<u>X1-X3</u>	<u>Z3</u>
V 5	<u>X5</u>	<u>Z5</u>