

ISOLANTE VIPI

Instruções de uso:

Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície a ser isolada, com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes. Quando fizer uso de filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso e aplique o isolante VIPI.

**Após o uso manter o frasco sempre fechado.
Validade: 2 anos**

Químico Responsável
Hélio Wiebeck
CRQ-IV 04302790

COMPOSIÇÃO
Água
Alginato de Sódio
Conservantes

Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
Se houver irritação, procure um médico. Não inflamável

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: +55 (19) 3565-5656 Fax: +55 (19) 3565-5650
SAC: 0800-0157700 - sac@vipi.com.br - www.vipi.com.br
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73 - Inscr. Est. 536.012.208.119 - Indústria Brasileira

AGITE ANTES DE USAR

A: 07/09



VIPI

ISOLANTE VIPI *Film*

PARA RESINAS ACRÍLICAS



CONTEÚDO 500 ml